

Gebrauchsanleitung

Gießbarer Zahnschutz Shield 260

1. Öffnen Sie vorsichtig den Kunststoffbehälter mit dem Aluminiumverschluss. Geben Sie den gesamten, flüssigen Inhalt der Plastikflasche in den Kunststoffbehälter. Verwenden Sie den beigelegten Holzspatel zum Anmischen. Das gesamte Pulver muss gründlich mit der Flüssigkeit vermischt werden.
2. Verwenden Sie den Holzspatel und geben Sie die fertige Mischung in den beigelegten Zahnschutz. Diese Schiene muss komplett gefüllt sein.
3. Lassen Sie den befüllten Zahnschutz für 2 Minuten stehen. Wenn Sie die Masse leicht berühren, muss Ihr Fingerabdruck darin zu sehen sein. In diesem Fall ist der Zahnschutz bereit für den nächsten Schritt.
4. Legen Sie den Zahnschutz in die obere Zahnreihe ein. Die Kerbe des Zahnschutzes sollte sich in der Mitte der beiden Schneidezähne befinden. Gehen Sie langsam und behutsam vor und drücken den Schutz nun vorsichtig über die Backenzähne der oberen Zahnreihe. Schließen Sie nun vorsichtig den Mund in Ihrer natürlichen Position mit Ihrem normalen Biss. Üben Sie keinen Druck auf den Zahnschutz aus.
5. Belassen Sie den Zahnschutz für 5 Minuten in dieser Position, verändern Sie dabei nicht die Position des Unterkiefers und üben keinen zusätzlichen Druck aus. Nach 5 Minuten entfernen Sie den Zahnschutz und halten ihn unter fließendes, kaltes Wasser.

Hinweise:

1. Überstehendes Material können Sie mit einem scharfen Messer oder einer Schere entfernen. Gehen Sie dabei behutsam vor.
2. Zur Reinigung halten Sie den Zahnschutz nach Gebrauch unter fließendes Wasser und reinigen ihn vorsichtig mit einer weichen Zahnbürste.
3. Sollte der Zahnschutz zu groß sein, können Sie vor dem Einfüllen der fertigen Mischung die Enden etwas kürzen. Dies könnte vor allem bei älteren Kindern der Fall sein.